

1. Numuneyi almadan önce bebeğin bir saat boyunca bir şey yemediğinden emin olun.

2. Talep ve onay formunu elektronik ortamda ve okunaklı el yazısı ile eksiksiz doldurun (doldurulabilir PDF) .



3. Her iki tüpü de çıkarın ve hasta verilerini doldurun.

4. Çubuğu iki plastik tüpten birinden çıkarın.



5. Örnek alırken kafasını desteklemek için bebeğin yanağını bir elinizle tutun.



6. Swabı bebeğin ağızına yerleştirin ve 10-15 kere yukarı ve aşağı hareketlerle bir iç yanağa sürün. Her iki tarafın yanak ile temasını sağlamak için yukarı ve aşağı hareket ederken çubuğu çevirin.



7. Çubuğu tekrar tüpe yerleştirin, bir "klik" sesi duyarsınız.



8. Diğer swab ile 4 ila 7. adımları tekrarlayın.

9. Swabların tüplere iyi yerleştirildiğinden ve tüplerin kapalı olduğundan emin olun. Ayrıca tüplerdeki etiketleri ve talep ve onay formunu tam olarak doldurun ve imzalayın.

10. Her iki tüpü de içine swab olacak şekilde ve imzalı doldurulmuş talep formu ile kutuya koyun.